



OZON-SAUERSTOFF- THERAPIE

OZONE-OXYGEN-THERAPY

HAB[®] HERRMANN SETZT SEIT 1984 NEUE STANDARDS IN DER OZON-SAUERSTOFF-THERAPIE


Hyperbare und normobare Geräte.

WAS IST MEDIZINISCHES OZON? // WHAT IS MEDICAL OZONE?

- ist ein sehr reaktionsfreudiges, drei-atomiges Sauerstoff-Molekül (O^3). // is a highly reactive three-atom oxygen molecule (O^3).
- besteht aus hauptsächlich reinem, medizinischem Sauerstoff und einer bestimmten Menge an Ozon (max. 5%). // consists of mainly pure medical oxygen and a specific amount of ozone (max. 5%).
- ist farblos und erkennbar an seinem charakteristischen Geruch. // is colourless and has a very distinctive odour.
- hat eine stark ausgeprägte bakterizide, viruzide, fungizide und antiparasitäre Wirkung und wird daher seit Jahrzehnten in vielen verschiedenen Bereichen angewendet. // has a strong bactericidal, virucidal, fungicidal and antiparasitic effect and has therefore been used in many different areas for decades.
- wird mit unseren Ozon-Therapiegeräten durch elektrische Entladung erzeugt und als Ozon-Sauerstoff-Gemisch in exakter Konzentration und Dosierung eingesetzt. // is generated with our ozone-therapy-devices by electrical discharge and used as an ozone-oxygen-mixture in an exact concentration and dosage.

HAB[®] HERRMANN HAS BEEN
SETTING NEW STANDARDS
IN OZONE-OXYGEN-THERAPY
SINCE 1984

Hyperbaric and normobaric devices.

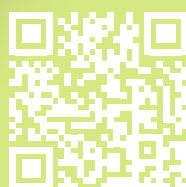

SCANNEN FÜR
MEHR INFOS!
SCAN FOR
MORE INFORMATION!





Hyper Medozon *comfort*

Designed für die hyperbare große Eigenbluttherapie mit Therapieprotokoll und Wiederholungsfunktion.

Das **Hyper Medozon** *comfort* deckt das komplette Spektrum der Ozon-Sauerstoff-Therapie ab und macht es somit zu einem weltweiten Erfolg.

Designed for hyperbaric large autohaemotherapy with therapy protocol and repeat function. The **Hyper Medozon** *comfort* device covers full spectrum of ozone-oxygen-therapy. This makes it a worldwide success.



APPLIKATIONS-METHODEN // APPLICATION-METHODS

- ✓ GROSSE EXTRAKORPORALE EIGENBLUTBEHANDLUNG (hyperbar und normobar) // LARGE EXTRACORPOREAL AUTOHAEMOTHERAPY (hyperbaric and normobaric)
- ✓ REKTALE DARMINSUFFLATION // RECTAL INTESTINAL INSUFFLATION
 - ✓ TRANSCUTANES GASBAD (Beutelbegasung) // TRANSCUTANEOUS GAS BATH (bag gassing)
 - ✓ LOKALE INJEKTIONEN (s.c. / i.m. / i.art. / i.c.) // LOCAL INJECTIONS (s.c. / i.m. / i.art. / i.c.)
 - ✓ HERSTELLUNG VON OZONISIERTEM WASSER // PRODUCTION OF OZONATED WATER



Medozon compact

Zuverlässiges System für die normobare Ozon-Sauerstoff-Therapie. Das **Medozon compact** ist durch die vielen Therapiemöglichkeiten ein sehr leistungsfähiges Gerät.

Reliable system for normobaric ozone-oxygen-therapy. The many different therapy possibilities make the **Medozon compact** a powerful device.

	Hyper Medozon <i>comfort</i>	Medozon <i>compact</i>
Maße // Dimensions	424 x 185 x 388 mm	424 x 185 x 388 mm
Gewicht // Weight	13,5 kg (inkl. Luftfalle // incl. air trap)	12,1 kg
Spannungsversorgung // Power supply system	100-240 V / 50-60 Hz	
Leistungsaufnahme // Power input	190 VA	190 VA
Ozon-Konzentration // Ozone-concentration	0; 2-80 µg/ ml (Regelung über UV-Analyser) stufenlos einstellbar (Control via UV-analyser) infinitely adjustable	0; 2-80 µg/ ml stufenlos einstellbar // infinitely adjustable
Durchfluss // Flow rate	1,0 l/ min	1,0 l/ min
Farbvarianten // Colour options	grün oder silber // green or silver	grün oder silber // green or silver
Applikations-Methoden // Application-Methods	• Hyperbare & normobare große Eigenblut-Therapie // Hyperbaric and normobaric large autohaemotherapy • Kleine Eigenbluttherapie // Small autohaemotherapy • Spritzenentnahme // Syringe withdrawal • Dauerbegasung // Permanent gassing • Darminsufflation // Intestinal insufflation • Wasserozonisierung // Water ozonation	• Sämtliche Anwendungen im normobaren Bereich // Suitable for all types of normobaric ozone treatments • Spritzenentnahme // Syringe withdrawal • Dauerbegasung // Permanent gassing • Darminsufflation // Intestinal insufflation • Wasserozonisierung // Water ozonation
Vakuumfunktion // Vacuum function	Ja // yes	Ja // yes
Sonstige Informationen // Further information	• Mehrsprachige, einfache Bedienung über Touchscreen // Multilingual, easy to use by touchscreen • Konzentration über Nummern-tasten stufenlos einstellbar // Concentration with number keys infinitely adjustable • Aquazon ist anschließbar // Suitable for connecting the Aquazon • Integrierter Analyser zur Messung & Regelung der eingegebenen Ozon-Konzentration // Integrated analyser for measuring and regulating of the entered ozone-concentration • Geschlossenes System // Closed system • Kann auf Ozon-Gerätewagen WEIKO gestellt werden // Can be placed on the Ozone-Cart WEIKO	• Mehrsprachige, einfache Bedienung über Touchscreen // Multilingual, easy to use by touchscreen • Konzentration über Nummern-tasten stufenlos einstellbar // Concentration with number keys infinitely adjustable • Aquazon ist anschließbar // Suitable for connecting the Aquazon • Kann auf Ozon-Gerätewagen WEIKO gestellt werden // Can be placed on the Ozone-Cart WEIKO • Transportabel mit Transportkoffer // Transportable with transport case
Medizinische Produktklassifizierung // Medical product classification	II b	

Zubehör

Transportkoffer // Transport case S / M



Ozon-Gerätewagen WEIKO // Ozone-Cart WEIKO



Medozon *shaker*



Aquazon



Medozon *i-set*



Weiteres Zubehör erhältlich // Other accessories available

HERRMANN APPARATEBAU GMBH

Im Höning 3
63820 Elsenfeld
Germany

T +49 (0) 6022 6581-3

info@hab.gmbh
www.h-a-b.de

