



OZONO-OXÍGENO TERAPIA

OZONE-OXYGEN-THERAPY

HAB® HERRMANN NUEVAS NORMAS EN 1984 NUEVOS ESTÁNDARES EN OZONO- OXÍGENOTERAPIA

Dispositivos hiperbáricos y
normobáricos.

QUÉ ES EL OZONO MÉDICO? // WHAT IS MEDICAL OZONE?

- El ozono es una molécula triatómica de oxígeno (O₃) altamente reactiva. // is a highly reactive three-atom oxygen molecule (O₃).
- Consiste principalmente en oxígeno puro de uso médico y una cierta cantidad de ozono (máx. 5%). // consists of mainly pure medical oxygen and a specific amount of ozone (max. 5%).
- Es incoloro y se reconoce por su olor característico. // is colourless and has a very distinctive odour.
- Tiene un fuerte efecto bactericida, virucida, fungicida y antiparasitario, por lo que se utiliza desde hace décadas en numerosos ámbitos. // has a strong bactericidal, virucidal, fungicidal and antiparasitic effect and has therefore been used in many different areas for decades.
- Se genera con nuestros aparatos de ozonoterapia mediante descarga eléctrica y se utiliza como mezcla de ozono y oxígeno en concentración y dosis exactas. // is generated with our ozone-therapy-devices by electrical discharge and used as an ozone-oxygen-mixture in an exact concentration and dosage.

HAB® HERRMANN HAS BEEN
SETTING NEW STANDARDS
IN OZONE-OXYGEN-THERAPY
SINCE 1984

Hyperbaric and normobaric devices.



BUSCAR MÁS
INFORMACIÓN
SCAN FOR
MORE INFORMATION!





Hyper Medozon^{comfort}

Diseñado para la terapia hiperbárica de sangre autóloga de gran tamaño con protocolo de terapia y función de repetición. La **Hyper Medozon^{comfort}** cubre el espectro completo de la terapia de ozono-oxígeno, por lo que es un éxito en todo el mundo.

Designed for hyperbaric large autohaemotherapy with therapy protocol and repeat function. The **Hyper Medozon^{comfort}** device covers full spectrum of ozone-oxygen-therapy. This makes it a worldwide success.



MÉTODOS DE APLICACIÓN // APPLICATION-METHODS

- ✓ Tratamiento con sangre autóloga extracorpórea grande (hiperbárica y normobárica) // LARGE EXTRACORPOREAL AUTOHAEMOTHERAPY (hyperbaric and normobaric)
- ✓ Insuflación intestinal rectal // RECTAL INTESTINAL INSUFFLATION
 - ✓ Baño de gas transcutáneo (gasificación con bolsa) // TRANSCUTANEOUS GAS BATH (bag gassing)
 - ✓ Inyecciones locales (s.c. / i.m. / i.art. / i.c.) // LOCAL INJECTIONS (s.c. / i.m. / i.art. / i.c.)
 - ✓ Producción de agua ozonizada // PRODUCTION OF OZONATED WATER



Medozon compact

Zuverlässiges System für die normobare Ozon-Sauerstoff-Therapie. Das **Medozon compact** ist durch die vielen Therapiemöglichkeiten ein sehr leistungsfähiges Gerät.

Reliable system for normobaric ozone-oxygen-therapy. The many different therapy possibilities make the **Medozon compact** a powerful device.

	Hyper Medozon comfort	Medozon compact
Dimensiones // Dimensions	424 x 185 x 388 mm	424 x 185 x 388 mm
Peso // Weight	13,5 kg (incl. trampa de aire // incl. air trap)	12,1 kg
Alimentación // Power supply system	100-240 V / 50-60 Hz	
Consumo de energía // Power input	190 VA	190 VA
Concentración de ozono // Ozone-concentration	0; 2-80 µg/ ml (control mediante analizador UV) de ajuste continuo (Control via UV-analyser) infinitely adjustable	0; 2-80 µg/ ml Infinitamente ajustable // infinitely adjustable
Throughflow // Flow rate	1,0 l/ min	1,0 l/ min
Variantes de color // Colour options	verde o plata // green or silver	verde o plata // green or silver
Métodos de aplicación // Application-Methods	• Hiperbárica y normobárica terapia con sangre autóloga // Hyperbaric and normobaric large autohaemotherapy • Pequeña autohemoterapia // Small autohaemotherapy • Retirada de la jeringa // Syringe withdrawal • Fumigación continua // Permanent gassing • Insuficiencia intestinal // Intestinal insufflation • Ozonización del agua // Water ozonation	• Todas las aplicaciones en la rango normobárico // Suitable for all types of normo-baric ozone treatments • Retirada de la jeringa // Syringe withdrawal • Fumigación continua // Permanent gassing • Insuficiencia intestinal // Intestinal insufflation • Ozonización del agua // Water ozonation
Función de vacío // Vacuum function	Sí // yes	Sí // yes
Información adicional // Further information	• Multilingüe, manejo sencillo mediante pantalla táctil // Multilingual, easy to use by touchscreen • Concentración mediante botones numéricos botones de ajuste continuo // Concentration with number keys infinitely adjustable • Aquazon es conectable // Suitable for connecting the Aquazon • Analizador integrado para la medición y control de la concentración de ozono // Integrated analyser for measuring and regulating of the entered ozone-concentration • Sistema cerrado // Closed system • Se puede colocar en el carro del equipo de ozono WEIKO // Can be placed on the Ozone-Cart WEIKO	• Multilingüe, manejo sencillo mediante pantalla táctil // Multilingual, easy to use by touchscreen • Concentración mediante botones numéricos botones de ajuste continuo // Concentration with number keys infinitely adjustable • Aquazon es conectable // Suitable for connecting the Aquazon • Se puede colocar en el carro del equipo de ozono WEIKO // Can be placed on the Ozone-Cart WEIKO • Transportable con maleta de transporte // Transportable with transport case
Clasificación de productos médicos // Medical product classification	II b	

Accesorios

Maleta de transporte // Transport case
S / M



Carro para equipos de ozono WEIKO //
Ozone-Cart WEIKO



Medozon shaker



Aquazon



Medozon i-set



Otros accesorios disponibles // Other accessories available

HERRMANN APPARATEBAU GMBH

Im Höning 3
63820 Elsenfeld
Alemania

T +49 (0) 6022 6581-3

info@hab.gmbh
www.h-a-b.de

